


1 Začínáme s uložištěm Clarius Cloud

Jakmile vy nebo vaše nemocnice zakoupí Clarius skener (Clarius C3, L7,...), obdržíte email s výzvou, aby jste se připojili k uložišti Clarius Cloud vytvořením uživatelského jména (vaše emailová adresa) a hesla.

Pokud vám tato zpráva nepřijde, zkontrolujte v emailu složku spam nebo napište na **support@clarius.me**.

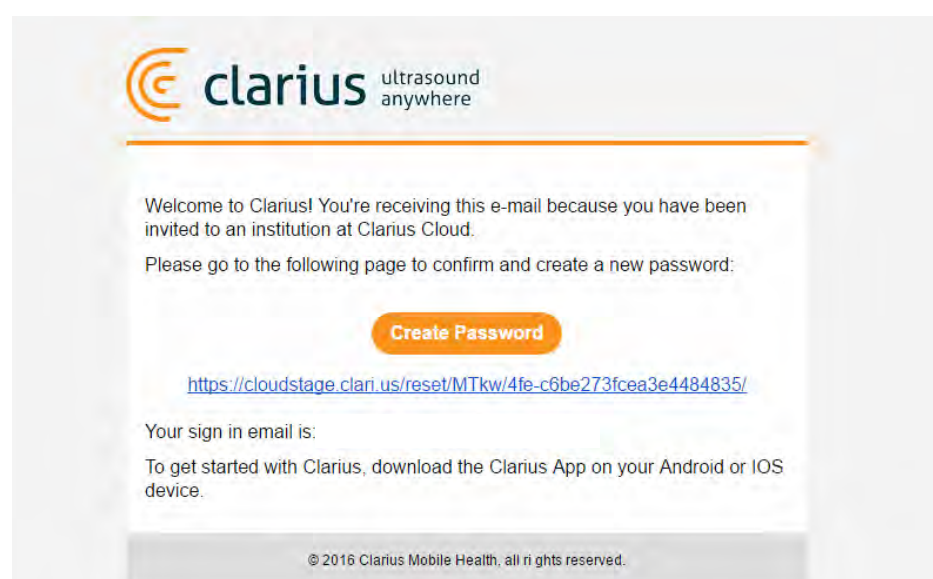


2 Stáhněte aplikaci Clarius z iTunes nebo Play Store



3 Vložte baterii

Až budete mít aplikaci Clarius staženou do vašeho chytrého zařízení (tablet, smartphone), odstraňte ochranný štítek z baterie a vložte ji do skeneru. Dioda na skeneru blikne modře, potom zeleně a nakonec zhasne. Skener je v režimu Standby a čeká na spuštění aplikace.

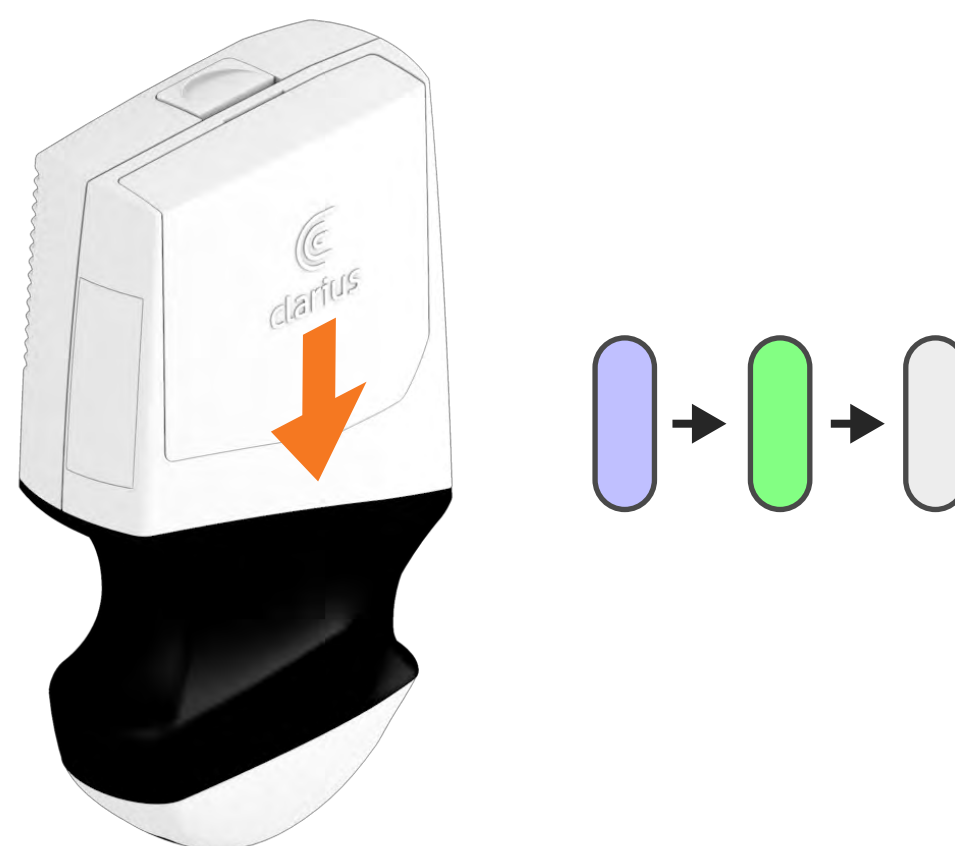

4 Spustíte aplikaci Clarius




5 Přihlaste se do aplikace

Zadejte emailovou adresu a heslo, které jste použili při registraci na uložiště Clarius Cloud. Při prvním přihlášení musíte být připojeni k WiFi internetu.




6 Zvolte váš skener

Až budete přihlášení, aplikace Clarius automaticky pomocí bluetooth vyhledá všechny skenery v blízkém okolí (aplikace vás vyzve k zapnutí bluetooth, pokud ho nemáte zapnuté). Vyberte ze seznamu váš skener (Clarius C3, L7,...). Indikátor síly signálu ukazuje, jak daleko je skener od vašeho chytrého zařízení.

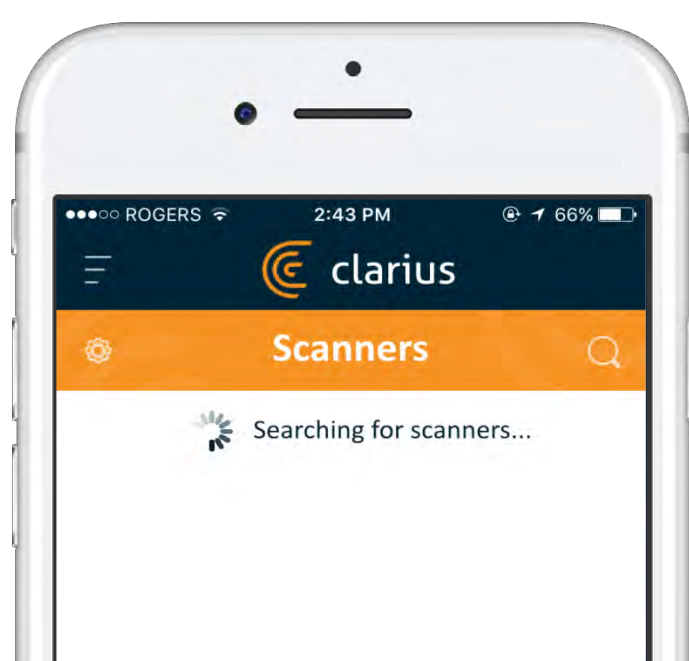

7 Nyní sledujte skener

Dioda na vašem skeneru bude blikat modře. Během 10 sekund přestane blikat a bude trvale svítit modře.

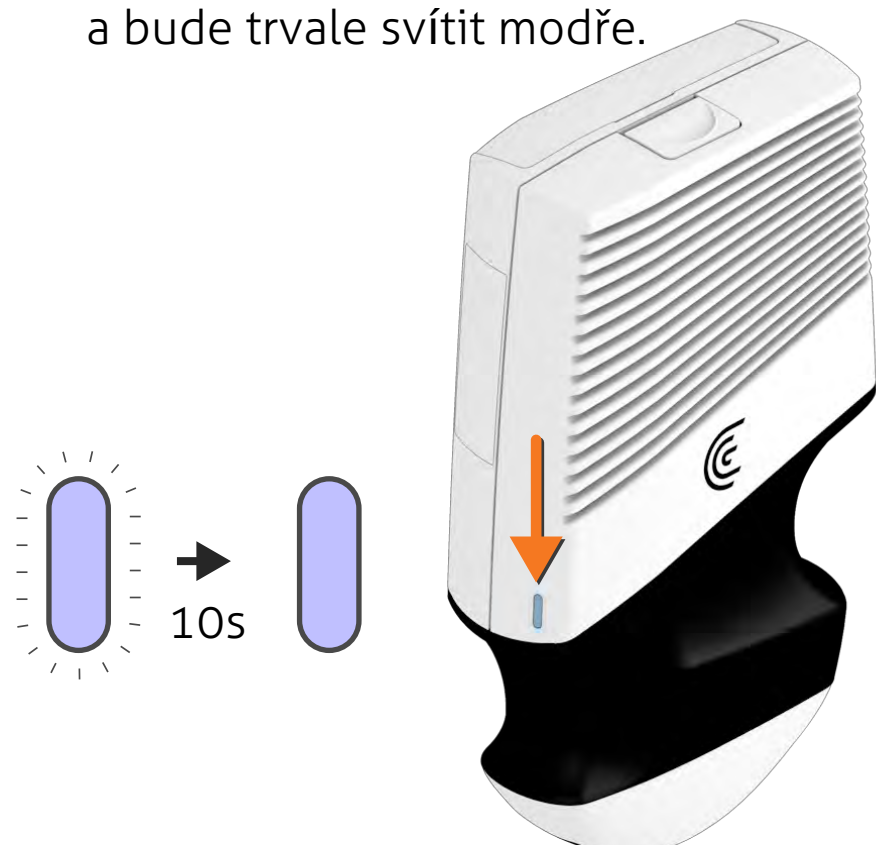

8 Zkontrolujte stav připojení


Symbol rotujícího kolečka v pravé horní rohu obrazovky ukazuje stav připojení. Po jeho stisknutí se objeví detailní informace o stavu připojení.





9 Připojte se přes WiFi Direct

Po úvodním úspěšném navázání spojení připojte vaše chytré zařízení k WiFi Direct síti skeneru (tj. přímé WiFi spojení mezi skenerem a chytrým zařízením). Systém vás vyzve k připojení do této specifické sítě skeneru.

Nejprve stiskněte tlačítko Home na chytrém zařízení, potom otevřete Settings (nastavení) a zvolte Wi-Fi.


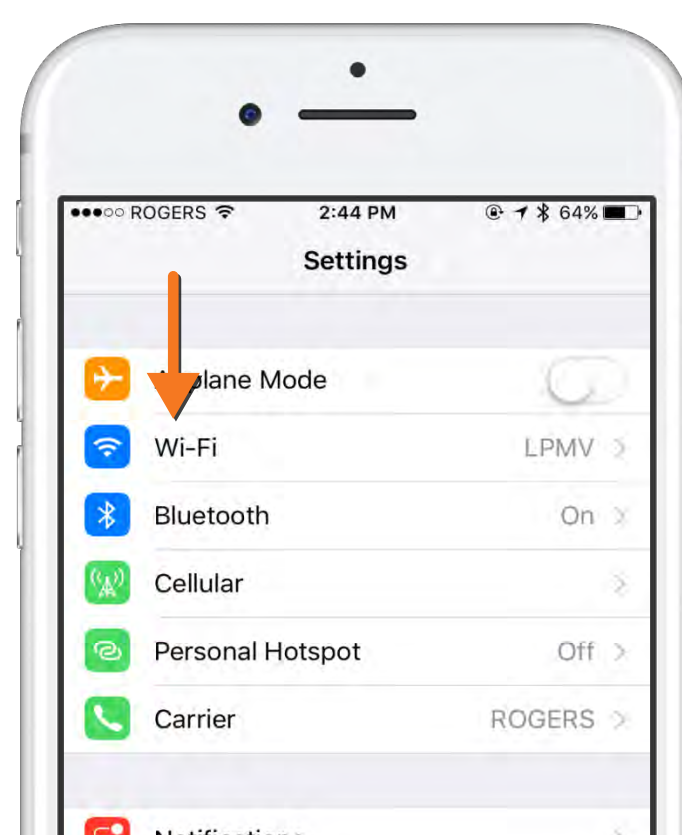


Vyberte název WiFi Direct sítě vašeho skeneru. Při prvním připojení budete potřebovat heslo (password) WiFi Direct sítě skeneru, které vám bylo oznámeno spolu se jménem WiFi Direct sítě a je uloženo ve schránce. Pro vložení hesla stačí stisknout Copy a potom Paste. Potom stiskněte "Join".

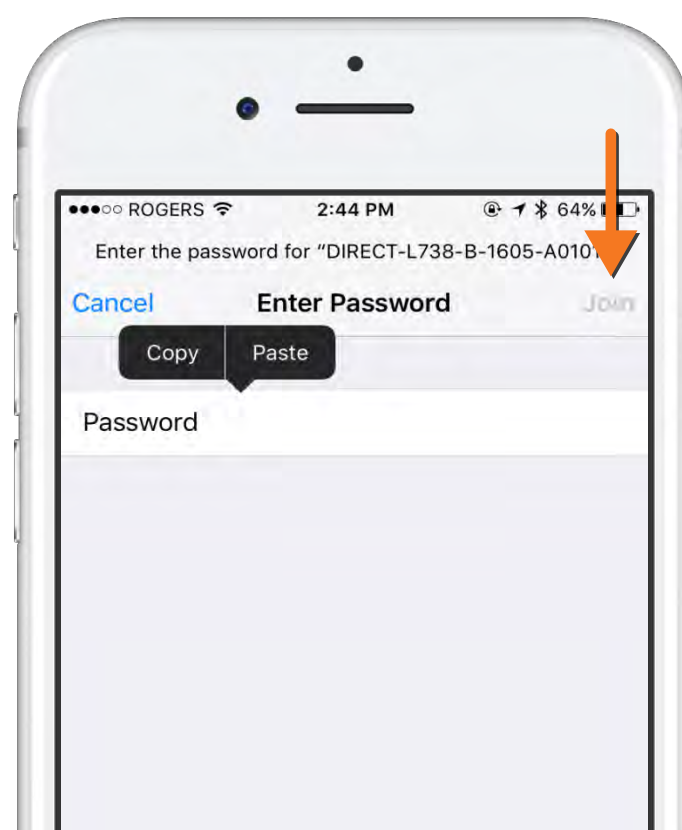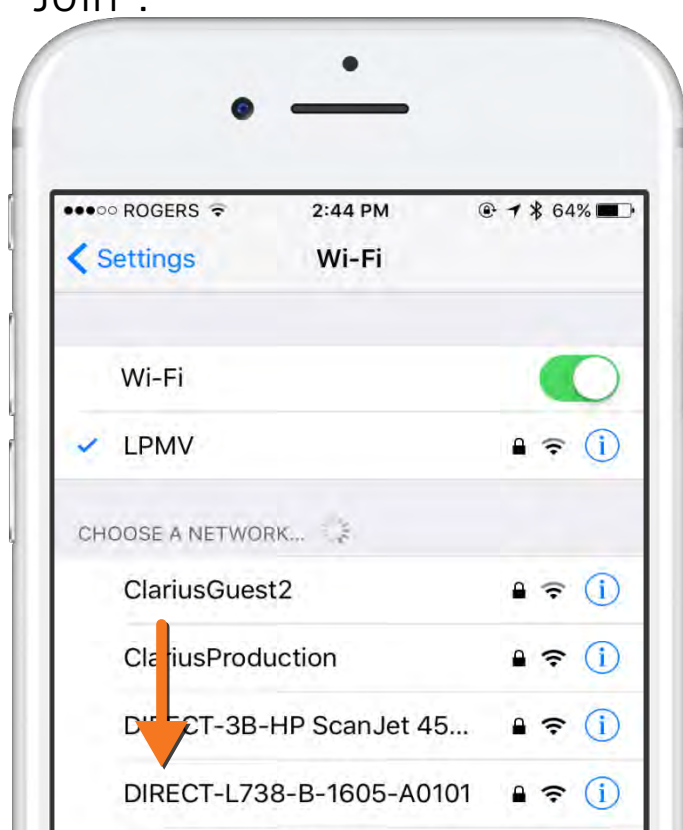


10 Jděte do aplikace Clarius

Stiskněte "Home" a potom ikonu aplikace "Clarius".

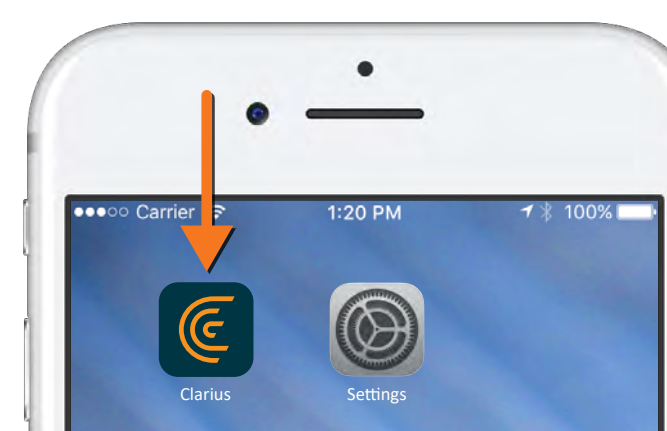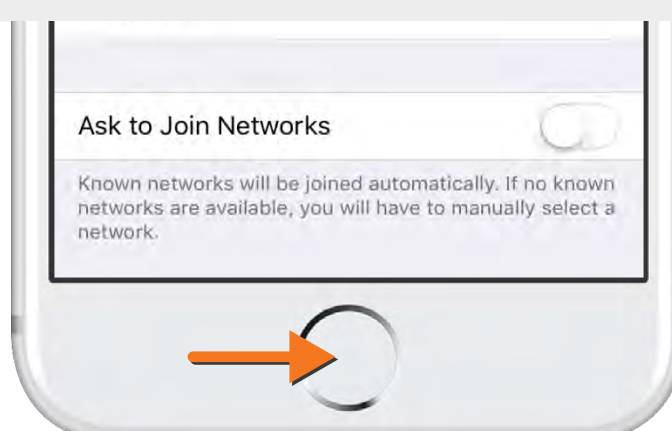


11 Vyberte typ vyšetření

Ze seznamu vyšetření "Workflows" zvolte typ vyšetření, které chcete provádět.

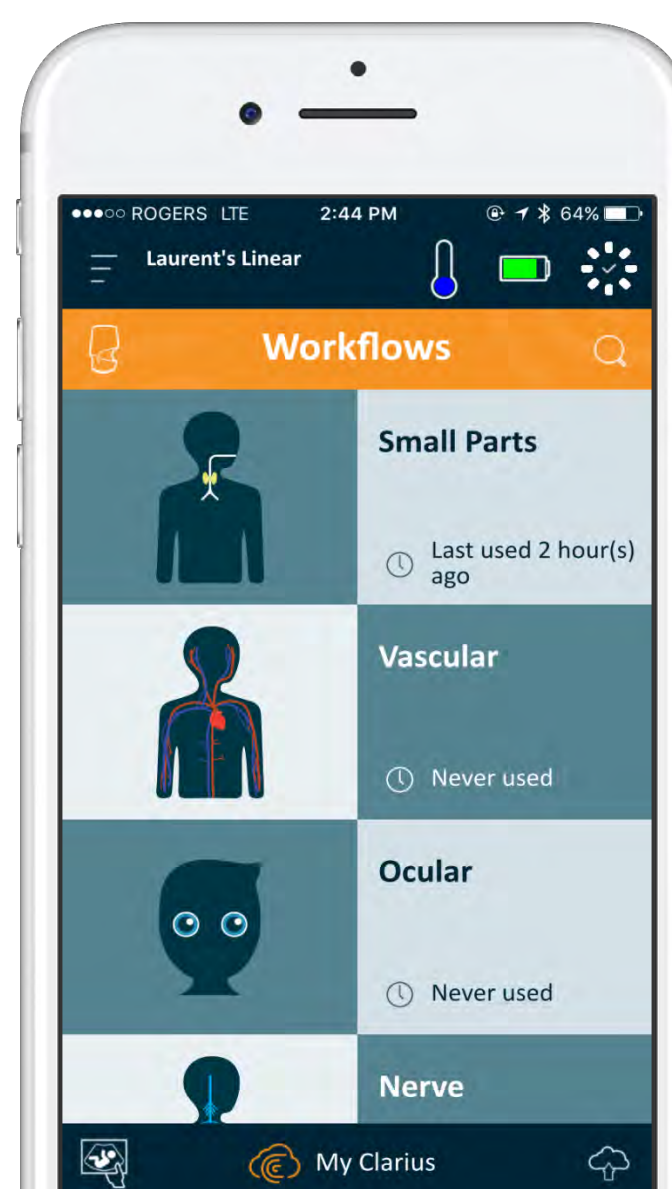


12 Údaje o pacientovi

Zadejte patientské údaje "Patient Demographics" a indikace "Indication", nebo jednoduše stiskněte šipku v pravém dolním rohu obrazovky a pokračujte dál.

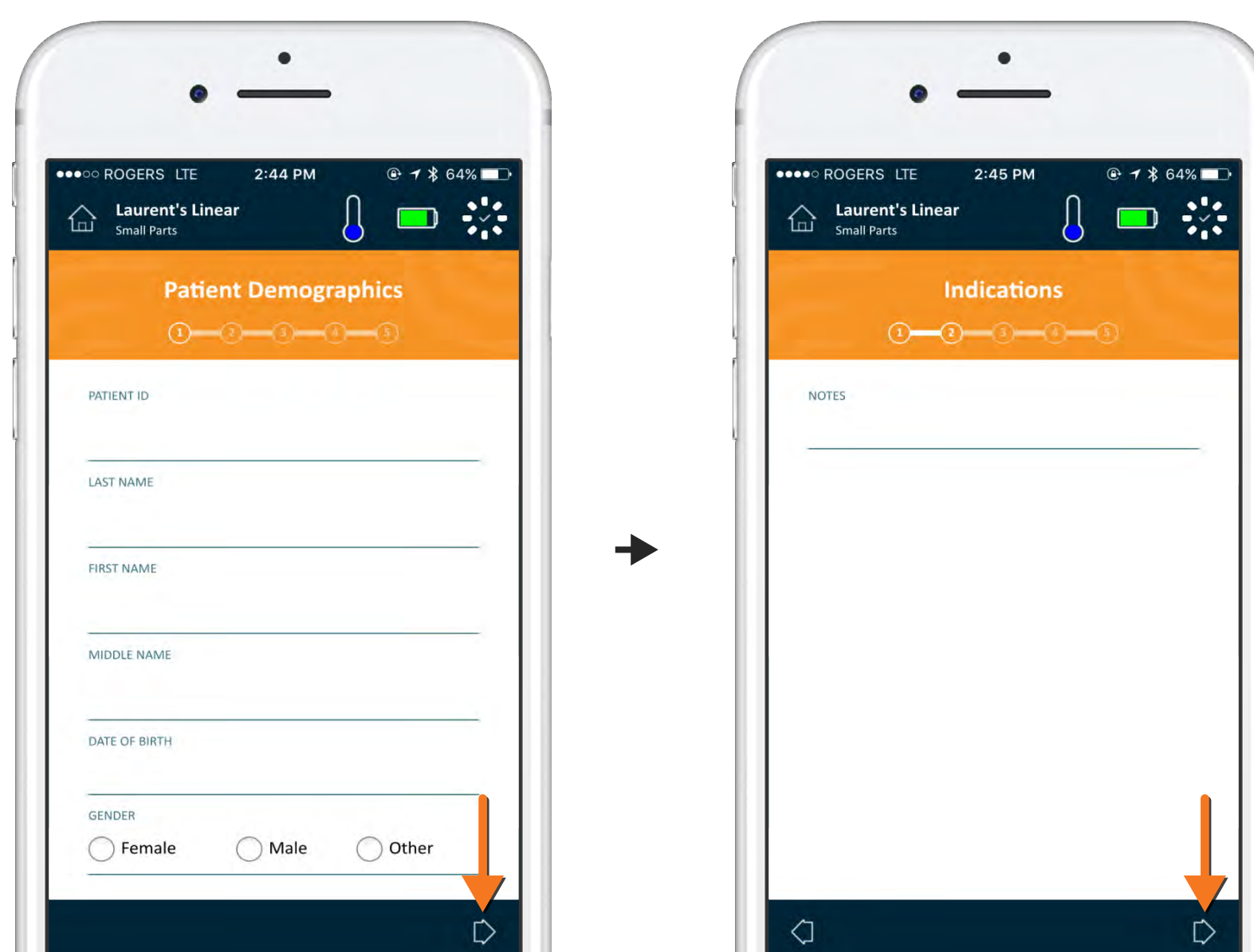

13 Jste připraveni k vyšetření

Nyní jste se dostali na obrazovku živého zobrazení. Podívejte se na výukové video na stránkách **www.clarius.me/tutorials**, kde se naučíte základní funkce a ovládání aplikace při vyšetřování.

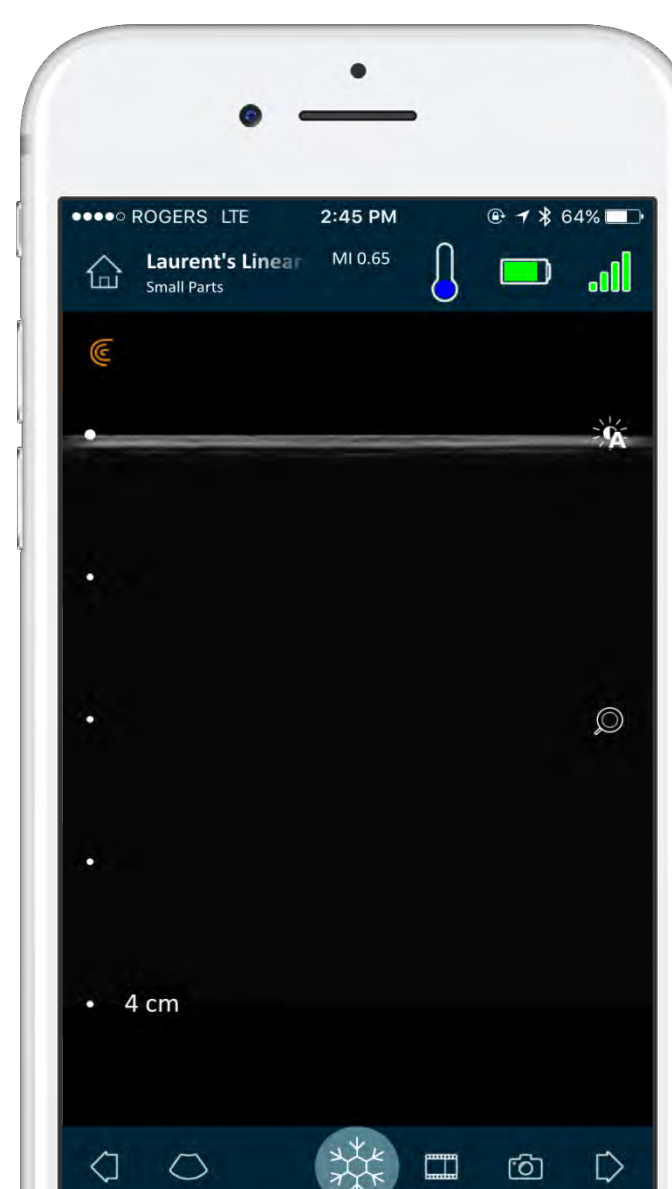

Pokud potřebujete pomoci s nastavením, navštivte prosím **www.clarius.me/support**.




Kompletní informace naleznete v uživatelském manuálu přístroje Clarius, který naleznete na : **www.clarius.me/manuals**.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO PŘIPOJOVÁNÍ V BUDOUCNU:


Vaše heslo bude uloženo pro budoucí použití, ale může být potřeba při přepnutí z výchozí WiFi sítě (domácí, firemní,...), kterou chytré zařízení používá při jiných funkcích, do WiFi Direct sítě Clarius skeneru.

Zde je několik rad ohledně připojení:

- a** Pokud budete provádět vyšetření v prostředí, kde není dostupná žádná WiFi síť, tak se automaticky provede připojení k WiFi Direct síti skeneru.
- b** Pokud se chcete přepnout do jiné WiFi sítě, nejrychlejší způsob je dvakrát kliknout na tlačítko Home, čímž se přepnete mezi nastavením vašeho zařízení a aplikací Clarius.

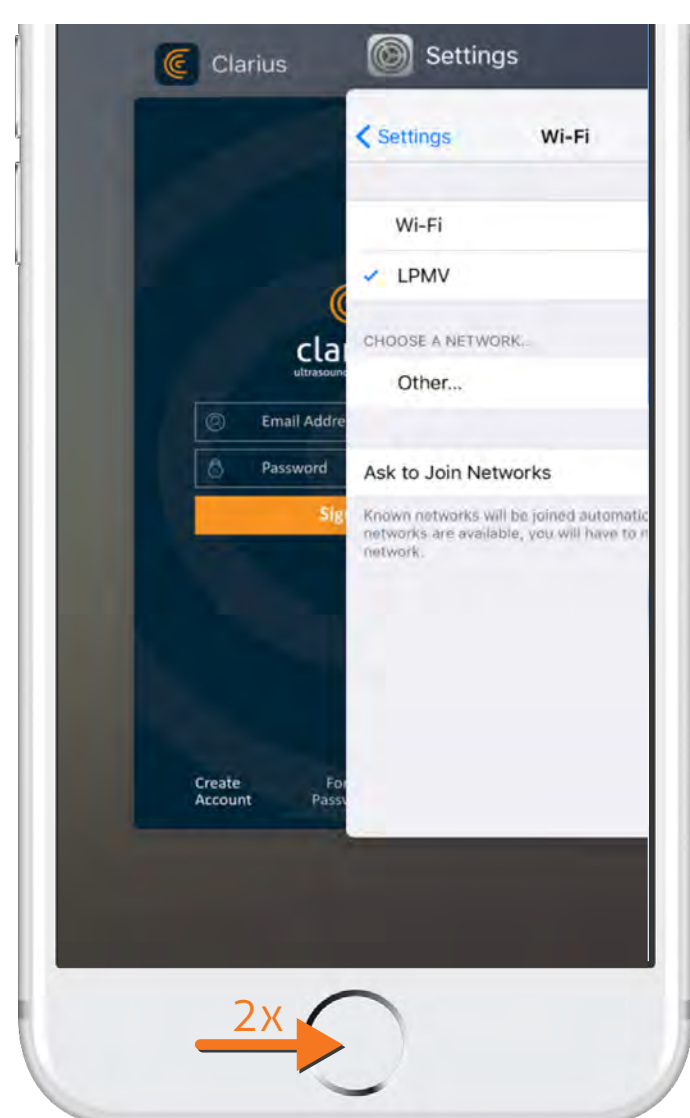


- c** Další možností je stisknout ikonu nastavení na obrazovce výběru skeneru a připojit skener k vaší síti. Kvalita zobrazení se bude měnit v závislosti na konfiguraci routeru.

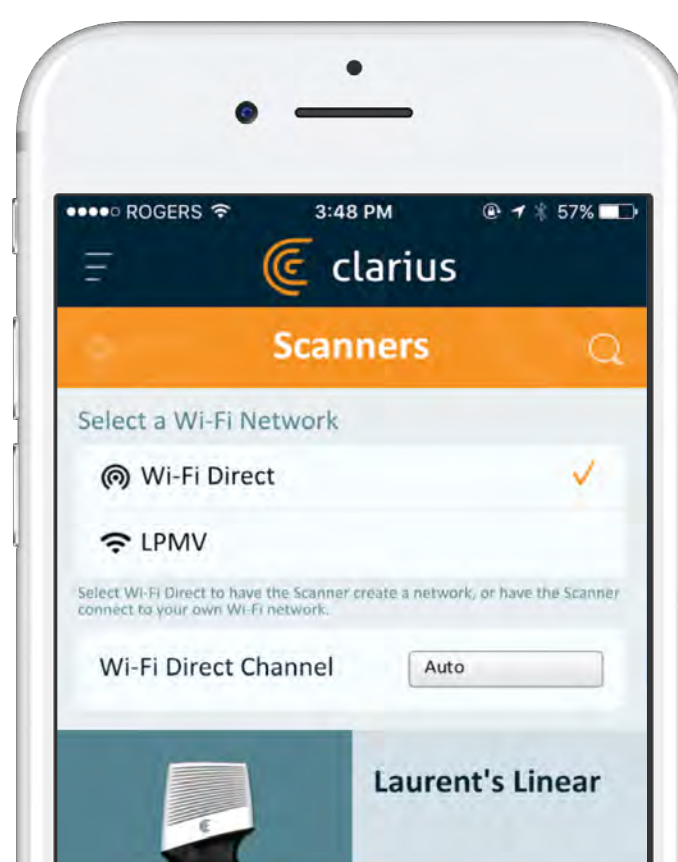

Aktualizace aplikace

V některých případech vás systém vyzve k aktualizaci softwaru vašeho skeneru. Stačí stisknout **update** a aktualizace se provede.


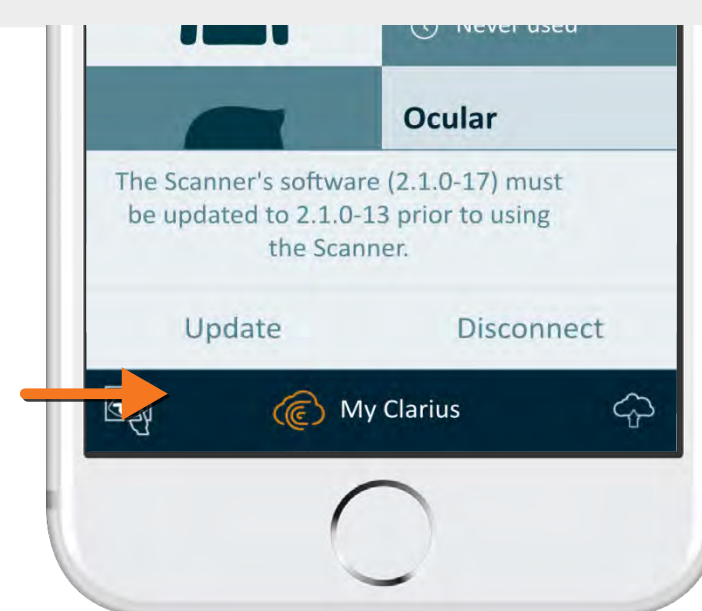


Během aktualizace

Dioda na skeneru nejdříve začne blikat modře, potom bude blikat fialově, zatímco software se aktualizuje.

Prosím nevytahujte během aktualizace baterii ze skeneru.

Fialový symbol je také zobrazen v pravém horním rohu obrazovky. Jakmile bude aktualizace hotová, dioda na skeneru začne svítit modře a připojení bude obnoveno automaticky.

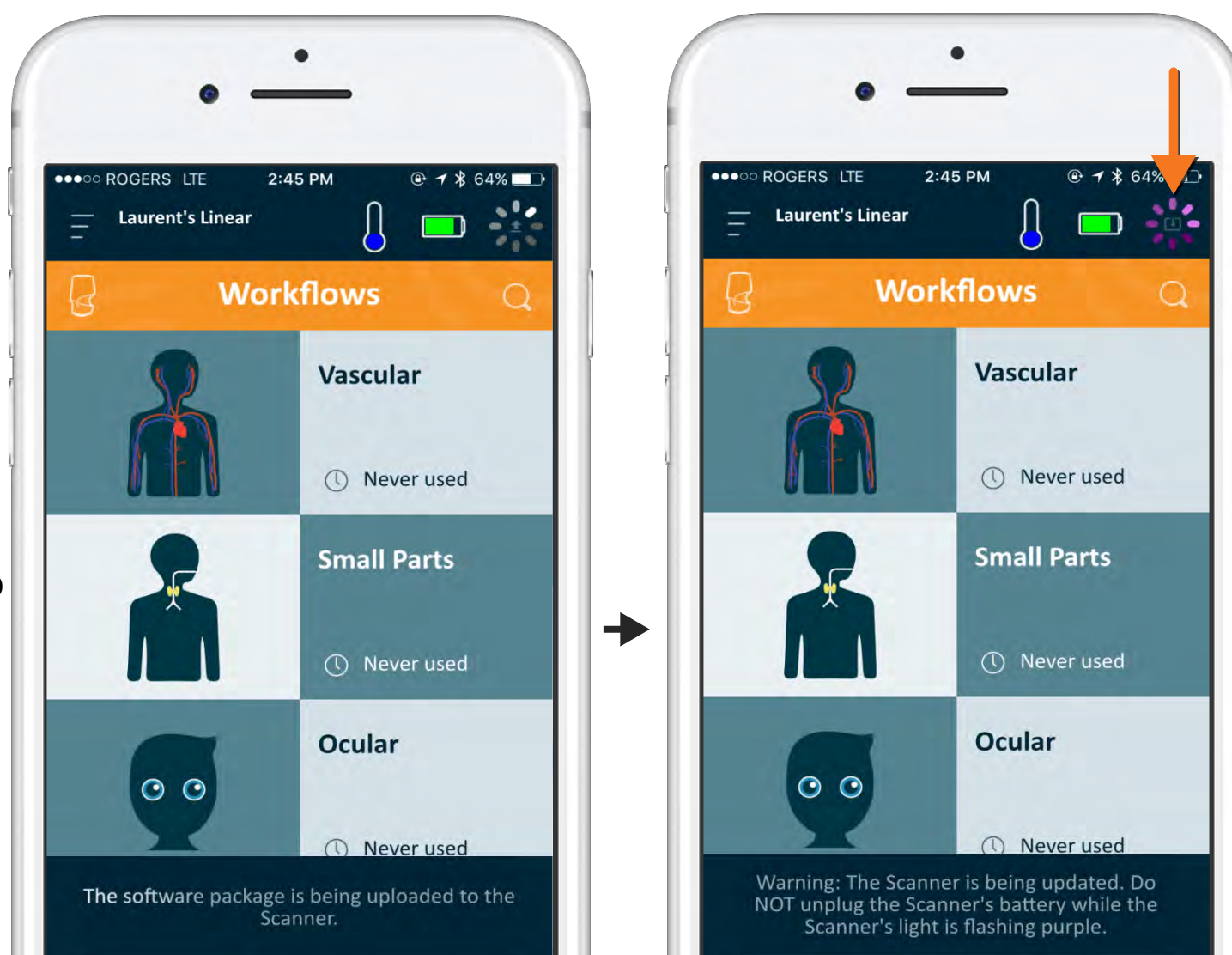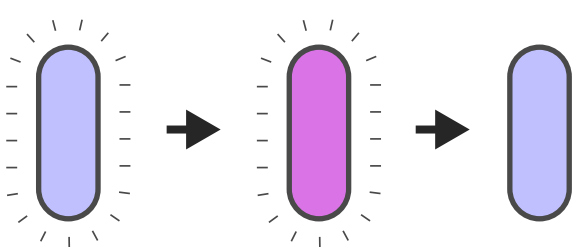

Po aktualizaci aplikace

Možná se budete muset znovu připojit k WiFi Direct síti skeneru, tak jako v bodě #9. Tentokrát již nebudete muset zadávat heslo WiFi Direct sítě.